

カメラ付き イヤークリーナー Pro

取扱説明書

安全上の注意

初めてこの製品を使用する場合、手や目の違和感を感じる可能性があります。不適切な操作は痛みを引き起こす場合があるため、一度操作を中断し、慣れたから再度行ってください。

⚠ 警告

1. 耳掃除中に耳垢が詰まる可能性があるため、注意して操作してください。違和感を感じたら無理に操作せず専門的な治療を受けることをお勧めします。
2. 耳の炎症がある場合、この製品の視覚機能を使用して確認することはできませんが、耳掃除機能の使用は避けてください。
3. 本製品には充電式バッテリーが内蔵されています。火の近くや高温の場所で使用・充電・保管しないでください。
4. 製品を落下させたり衝撃を与えないでください。損傷した場合は使用を中止してください。
5. 製品の改造、分解、修理をご自身で行わないでください。

⚠ 注意


1. 使用する前に、製品に損傷がないか確認してください。損傷がある場合や機器構造が劣化している場合は使用しないでください。
2. 充電する前に、使用する電圧が製品に記載されている規格に一致していることを確認してください。
3. 充電ポートまたはケーブルを傷つける可能性のある使用法は避けてください。
4. 充電ケーブルとポートが完全に乾いていることを確認してください。入浴中の使用は禁止です。

⚠ ポイント

- 他の人が使用した耳かきヘッドを直接使用しないでください。
- お子さまなど、経験や知識が十分でない人が使用する場合は、保護者の方が付き添って使用してください。

製品紹介

- 使用する前に、本マニュアルをよく読み、適切に保管してください。
- 製品、アクセサリ、およびマニュアルに記載されている図はすべて概略図であり、参考用です。製品のアップデートや改良により実物と異なる場合があります。

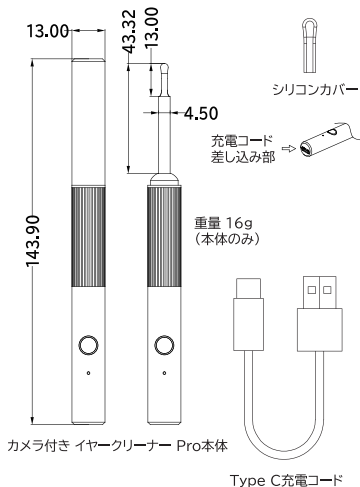

ご注意

本書に記載されている製品、付属品、およびイラストはすべて概略図であり、参考用として提供されています。製品の更新や改良により、実際の製品と概略図が異なる場合があります。必ず実際の製品をご確認ください。


ご使用方法

1. 以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードするか、Google Play または APP Store で「AiSee Pro」を検索してアプリをダウンロードしてください。※「AiSee Pro」はClean Ezeのアプリの名称です。



2. 電源ボタンを押してアプリを起動します。電源ランプが緑色に点滅します。必要に応じてシリコンカバーを交換してください。

- ① 電源ボタンを2秒長押しして電源をオンにします。
- ② 必要に応じてシリコンカバーを付け替えます。

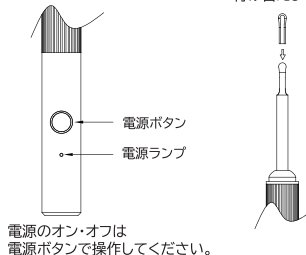


3. 「AiSee Pro」アプリを開き、ホームアイコンをタップして、Wi-Fi接続設定をします。

- ① アプリホーム画面
- ② Wi-Fi接続設定画面



4. 使用する端末のWi-Fiリストから、「AiSee」で始まるホットスポットを見つけます。リンクをクリックすると緑色の電源ランプが常に点灯し、アプリに戻ると接続情報が表示されます。アプリのホームボタンをタップするとビデオが表示され、準備完了です。

- ① 端末のWi-Fiリストから「AiSee」ではじまるホットスポットを探します。
- ② アプリとWi-Fiの接続が完了すると下記のように表示されます。

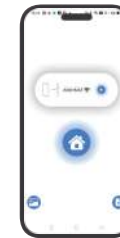

保証書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本保証書は保証期間内に無償修理・交換をお受けいただく際に必要な重要な書類です。取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

製品名	
品番	BBD1008
シリアル番号	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	ご購入から1年間
お客様	名前: 住所: 電話番号:
販売店	

保証書に販売店の印がない場合は、販売店のレシートを印の代わりとして保証書と一緒に保管の上、保証をお受けになる際はご提示ください。

日本正規輸入元



株式会社 シナジートレーディング

541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11
☎06-6233-3066 (平9:30~17:30)
Mail info@synergytrading.co.jp

保証規定

本保証規定は、製品保証書に明記した期間内において取扱説明書上の取扱方法、注意事項に従った正常な使用状態で製造上の欠陥・商品の素材の不良によって故障が生じた場合に無償修理もしくは交換をお約束するものです。
また当社の責任範囲は、この保証書に定める内容に準じた修理および交換に限ります。

保証期間はご購入から1年間有効とします。

本保証規定によって修理・交換をされる際の保証期間は当初ご購入日から起算して1年となります。保証を受けられた後の保証期間の延長はありません。
保証書の販売店の印がない場合は、販売店のレシートを印の代わりとして保証書と一緒に保管のうえ、保証を受ける際にご提示ください。

保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は

- 製品と保証書を添えてお買い上げの販売店または輸入元にご連絡の上、修理交換を行ってください。
- 修理受付時の代替のお貸出しは行っておりません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失・事業の中断・製品不良や使用時の不注意に起因する損害および、その他の金銭的損害を含む)に関しては免責とさせていただきます。
- 発送修理をご希望の場合は、製品と保証書を梱包のうえ発送してください。尚、発送先については輸入元までお問合せをお願いします。

保証期間内でも次の事項に該当する場合は保証の対象外とさせていただきます。
- 如何なる理由を問わず、分解をされた場合、分解された形跡がある場合
- お買い上げ後(通販の場合は到着後からの適用)の輸送・移動・落下などにより故障および破損が生じた場合。火災・地震・水害・落雷・天変地変などによる故障および破損が生じた場合
- 保証書提示がない場合
- 保証書にお買い上げ年月日・お客様氏名・販売店印の記入もしくはレシートの添付がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 他社の店頭もしくは通販で販売されたものが再販もしくは転売された商品である場合
開封の有無に関わらず輸入元出荷前の検品した状態を保たれていない可能性があるため保証の対象外となります。
(輸入元出荷時にシリアル管理のうえ出荷されており出荷先販売店をトレースしています。)

本保証書は日本国内のみ有効です。本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。また、保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。本保証書は明示した期間内に、保証規定に記載の条件のもとにおいて無償修理および交換をお約束するものです。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などご不明な場合は輸入元 (株)シナジートレーディング 06-6233-3066 にお問合せください。

クリーニング方法

使用中に汚れがカメラレンズの表面に付着し、視界に影響を与えることがあります。その際は、やさしく息を吹きかけるか綿棒を使用して取り除いてください。
本製品を水に浸して洗浄しないでください。

廃棄について

本製品を適切に廃棄してください。

このマークは、本製品を家庭ごみとして処理できないことを示しています。電気電子機器のリサイクルに適した収集場所に持ち込む必要があります。お住まいの地域における電器、電子製品回収に関する規定に従って正確に回収処理してください。



製品仕様

製品名	カメラ付き イヤークリーナー Pro
品番	BBD1008
動作周波数	Wi-Fi 2.4GHz
画像転送速度	25-30fps
ジャイロスコープ	5軸
画素数	1000万画素
電池仕様	3.7V 230mAh
連続仕様可能時間	約40分
充電時間	約1時間
入力電流	5V ≍ 0.4A
消費電力	0.5W
レンズ直径	3.6mm
画像センサー	CMOS
動作温度	-10~50℃

よくある質問

Q1: 「AiSee Pro」アプリを開くと、位置情報の許可やストレージアクセスの許可を求められます。これは何のためですか？

A: 位置情報の許可は、Wi-Fi端末との接続を迅速に行うためのものであり、個人情報を取得することはありません。ストレージアクセスの許可は、動画や画像の保存・共有を行うために必要であり、SDカードの状態を取得するために使用されます。

Q2: スマートフォンを本製品に接続すると「AiSee -XXXX」はインターネットに接続できません。利用可能なネットワークに切り替えますか？」と表示されます。どうすればよいですか？

A: 「AiSee -XXXX」のWi-Fiは、スマートフォンと接続するための専用ネットワークであり、インターネット接続機能はありません。このメッセージが表示された場合は、「許可しない」を選択してください。「許可する」を選択すると、スマートフォンが製品との接続を切断し、自宅のWi-Fiネットワークに接続してしまいます。そのため、製品が使用できなくなります。

Q3: 3種類のシリコンカバーはどのように使用しますか？
A: シリコンカバーは、ステンレス製の耳かきスプーンに取り付けて使用することで、快適に耳掃除が出来ます。

Q4: バッテリー残量が少なくなると通知されますか？
A: 電源ランプが緑色に素早く点滅します。

Q5: 充電中の状態はどうなりますか？
A: 製品を充電ケーブルに接続すると、電源ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、電源ランプは消灯します。

Q6: 接続に失敗する原因と対処方法を教えてください。
A: 接続失敗のメッセージが表示される場合、すでに他のスマートフォンと接続されている可能性があります。その場合は、一度製品の電源をオフにし、再度オンにして接続し直してください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	解決方法
製品を使用できない	バッテリー残量が少ない 充電ケーブルが抜けている	充電してください 充電ケーブルを正しく接続してください
フリーズする	電波干渉や一時的な不具合の発生 アプリの互換性に問題がある	本製品を再起動してください アプリをアンインストールし再インストールしてください
画像に影が写る	レンズに汚れが付着している	息を吹きかけるか綿棒でレンズを掃除してください
映像が固まる	システムのメモリデータが溜まりすぎている	アプリ内の不要なデータを削除してから再起動してください

定期的な充電について

電源ランプが高速点滅 すると、バッテリー残量が少ないことを示します。速やかに充電してください。充電中は赤色に点灯し充電完了後は消灯します。
フル充電には約1時間かかります。
長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。

注意事項

本製品の純正充電ケーブルは、「カメラ付き イヤークリーナー Pro」専用です。
他のデバイスの急速充電やデータ転送には非対応です。